

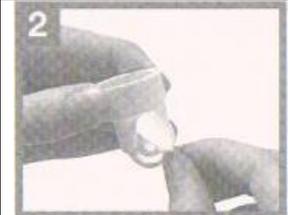
美樂 Medela Pump in Style Advanced 使用說明書

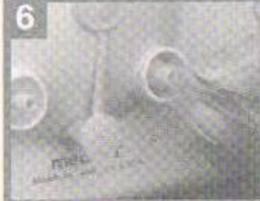
美樂 Pump in Style Advanced 擠奶器 (吸奶器) 提供兩階段吸乳頻率，第一階段快速且短促的頻率密集地刺激噴乳反射，第二階段轉為較緩慢的吸-放-停的吸乳節奏。可以達到最大的母乳量。我們建議媽咪要儘可能頻繁地哺乳，並且把乳房排空。第一個月是奶量建立的關鍵期，媽咪們一定要加油喔！

I. 安全提示

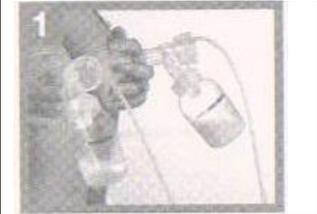
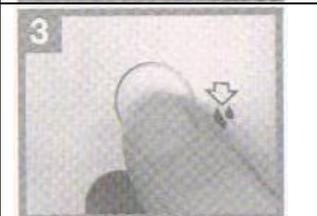
- A. 使用前請務必詳細閱讀此說明書，並依照本說明書指示的方法使用本產品。
- B. 使用完畢請立刻拔掉電源變壓器，請從變壓器接頭拔下，不可直接拉電線。
- C. 請勿將馬達主機放在水裡或其他液體中。
- D. 馬達主機若不小心掉落水裡，請先拔掉電源再拿起。
- E. 請確認電源符合變壓器的電壓。
- F. 如果有租用電池盒，請確認電池正負極方向正確。
- G. 請勿使用非原廠變壓器或電池盒。
- H. 請先將變壓器插在馬達主機上，再插入電源插座。
- I. 收藏變壓器時，請勿將電線纏繞過緊，以免電線斷裂。
- J. 請勿使用非原廠配件。
- K. 請勿讓幼兒玩弄電線、變壓器、軟管及其他配件，以免發生危險。
- L. 機件故障或是吸乳會疼痛時，請詢問母乳諮詢人員，或來電聯絡我們。

II. 使用方法

 A close-up photograph showing a person's hands attaching a clear, dome-shaped breast shield to the front of the pump's motor unit. The shield is being pushed onto a central protrusion.	將喇叭罩與接頭接好，如果是一體成型的喇叭罩，則可跳過此步驟。
 A close-up photograph showing a person's hands applying a small, white, circular membrane to a yellow piston inside the pump's head. The piston is partially inserted into a slot.	請將白色薄膜覆蓋在黃色活塞上，注意黃色活塞上是否有乳垢及毀損，乳垢及毀損會影響吸力。清洗時，白色薄膜需拆下清洗，用海綿或軟布清洗，請勿使用毛刷以免影響吸力。

	<p>將黃色活塞裝在喇叭下方，注意<u>開口(白色薄膜那面)與喇叭開口垂直，以免奶水回流到馬達造成機器損壞。</u></p>
	<p>將喇叭罩與奶瓶旋緊。</p>
	<p>將軟管黃色塑膠頭的一端接到喇叭罩的接孔處。(軟管內有奶水或是異物時，請用清水沖洗，並且把水分甩乾，請勿高溫煮沸消毒，請依照“清洗消毒方法”的指示清潔軟管。)</p>
	<p>軟管另一端接到馬達面板上的通氣孔。雙邊吸乳時，請將阻氣塞放在中間的圓柱上。(拔除軟管時，請輕輕旋轉軟管直到鬆脫即可，請勿用力拉扯。)</p>
	<p>如果只使用單邊吸乳時，請將阻氣塞放在另一個通氣孔上。</p>
	<p>將變壓器或是電池盒的接頭插在控制面板的電源孔上。安裝電池請注意電池的正負極，一共需要 10 顆 3 號電池，約可吸乳 2 個小時。請勿使用非原廠的變壓器或是電池盒，以免造成馬達損壞。</p>
	

III. 吸乳方法

	<p>將喇叭罩中心對準乳頭，喇叭罩與乳房密合，讓自己舒適地坐著。 請勿傾斜奶瓶，吸乳量也不要超過奶瓶的最高刻度。請勿扭曲軟管。</p>
	<p>打開電源開關，調整讓自己感到舒適的吸力。前兩分鐘頻率較快，兩分鐘後轉換為集乳模式。</p>
	<p>如果媽媽不到兩分鐘就有噴奶反應，可以直接按水滴鈕轉成集乳模式。</p>

IV. 清洗消毒方法

I 所有接觸母乳的配件，包括喇叭罩、活塞、薄膜、奶瓶使用完後都要清洗消毒。活塞和薄膜清洗時需要拆開。用軟布或是海綿，請勿用刷子以免產生刮痕影響吸力。**軟管不可高溫消毒**，只要按照以下方式清洗風乾就可以了。

A. 原則上，每次使用完都要清洗，一天消毒一次。

B. 清洗方式 – 將所有接觸到母乳的配件拆開，馬達、變壓器、電池盒除外，放入室溫肥皂水中洗滌，再以清水清洗乾淨，放在乾淨的毛巾上自然風乾。**喇叭罩請不要用奶瓶清潔劑清洗，因為軟的部分容易有清潔劑殘留**，消毒烘乾後會殘留在表面。

C. 消毒方式 –

1. 煮沸消毒 - 將配件清洗後放入深鍋，注入冷水覆蓋所有配件，加熱煮沸後在煮 3 分鐘即可。

2. 蒸氣消毒 – 依照蒸氣消毒鍋的使用方法消毒即可。

* 注意 – **請勿使用微波、紫外線或是臭氧消毒，以免損壞配件。**

D. 軟管清潔方式 –

1. 如果軟管內有霧氣，請將軟管插在馬達通氣孔上，讓馬達空轉直到軟管全乾為止，按水滴鈕以集乳模式比較容易風乾。

2. 如果軟管內有乳汁，請先以清水清洗乾淨後，先將管內水滴用乾，再將軟管插在馬達通氣孔上，讓馬達空轉直到軟管全乾為止，按水滴鈕以集乳模式比較容易風乾。